

	<b>DİJİTAL TANSİYON ALETİ KULLANMA TALİMATI</b>	Doküman No: DPU-KYS-TL-53
		İlk Yayın Tarihi: 05.12.2023
		Rev. No: 00
		Rev. Tarihi: --

### 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu uygulama laboratuvarında bulunan dijital tansiyon aletinin doğru ve güvenli bir biçimde kullanılmasını tanımlamaktır.

### 2. KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu uygulama laboratuvarında bulunan Dijital Tansiyon Aleti ile yapılacak olan ölçümleri kapsar.

### 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği uygulama laboratuvarını kullanan program koordinatörleri ve öğrencileri sorumludur.

### 5. UYGULAMA

**5.1.** Cihazı, LCD ekran yukarı gelecek şekilde konumlandırın ve pillerin yeni olmasına ve doğru takılmış olmasına dikkat edin.

**5.2.** Ölçüm yapmadan önce 5-10 dakika sabit kalın ve yemek yemekten, içmekten ve hareket halinde olmaktan kaçının.

**5.3.** Üst kolunuza sıkıca oturan herhangi bir giysi var ise çıkarın.

**5.4.** Tansiyon aletinin manşonu dirsekten 3cm yukarıda kalacak şekilde kola sarılmalı, ölçüm yapılacak kol kalp hizasında olup desteklenmeli ve ölçüm için düğmeye basılıp manşonun şişmesi sağlanmalıdır. Her zaman aynı kol üzerinden ölçüm yapılmalıdır (Normalde solda).

**5.5.** Ölçüm esnasında konuşmayınız.

**5.6.** Manşonun doğru sabitlenmesi önemlidir. Gevşek veya açık bir manşet yanlış okumalara neden olur.

**5.8.** Dijital tansiyon aleti kullanımı sonrasında uygun şekilde temizliği yapılır, pilleri çıkartılır ve kaldırılır.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. SEMA TOKER	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY