

	<b>YETİŞKİN/ÇOCUK/BEBEK CPR MAKETİ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI</b>	Doküman No: DPU-KYS-TL-54
		İlk Yayın Tarihi: 05.12.2023
		Rev. No: 00
		Rev. Tarihi: --

## 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu uygulama laboratuvarında bulunan Yetişkin/Çocuk/Bebek CPR Maketi kullanım ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

## 2. KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu Uygulama Laboratuvarını kapsar.

## 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

## 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Uygulama Laboratuvarını kullanan program koordinatörleri ve öğrencileri sorumludur.

## 5. UYGULAMA

**5.1.** Manken taşıma kabından çıkarılarak düz bir zemin üzerinde veya masa üzerinde kurulur. Yere konulacaksa mutlaka altına bir örtü yerleştirilir.

**5.2.** Mankene yapılacak uygulama öncesi doğru basının, doğru el uygulamasının ve doğru yere kalp masajı yapıldığını gösteren cihazın mankene bağlanması gerekir ve pillerinin her uygulama öncesi takılıp, uygulama sonrası çıkarılması gerekir.

**5.3.** Mankenin zarar görmemesi için göğüs basıları göğüs kafesinin orta noktasına sternuma uygulanmalıdır.

**5.4.** Mankenlerinin kullanımı öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

**5.5.** Kullanım sırasında mankende oluşacak hasarlar hakkında tutanak tutularak kalite birim sorumlusuna haber verilir.

**5.6.** Gerekli olduğunda sorumlu Öğretim Görevlileri, mankenlerin bakım ve onarımları için ilgili firma / servis ile temasa geçer.

**5.7.** Temizlik esnasında kimyasal madde kullanılmaz. Su ve sabunla silinir.

**5.8.** Kullanım işlemleri bitince maketler kapalı kutusuna yerleştirilir.

## 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. SEMA TOKER	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY