

	TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER KULLANMA TALİMATI	Doküman No: DPU-KYS-TL-55
		İlk Yayın Tarihi: 05.12.2023
		Rev. No: 00
		Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu uygulama laboratuvarında bulunan Temassız Ateş Ölçer cihazının doğru ve verimli bir biçimde kullanılmasını tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu Uygulama Laboratuvarında bulunan Temassız Ateş Ölçer cihazı ile yapılacak olan ölçümleri kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği uygulama laboratuvarını kullanan program koordinatörleri ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1 Cihaz; üzerinde bulunan kızılötesi sensor sayesinde, vücudun yaydığı 5-14 µm dalga boyundaki kızılötesi ışımayı algılayarak insan vücut sıcaklığını ölçer.

5.2. Ortam sıcaklığının 10,0 °C den küçük olduğu durumlarda ve 40,0 °C den büyük olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

5.3. Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dahil ısıdan uzak tutulmalıdır.

5.4. Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme ya da çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.

5.5. Cihazı 5 cm'lik mesafeden ölçüm düğmesine basarak altına tutun, ateş hemen görülecektir. Alında saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin.

5.6. Oda sıcaklığı önemli derecede farklı ise veya alın terli ise, ateşi kulak memesinin arkasından da ölçebilirsiniz.

5.7. Cihaz kullanıldıktan sonra nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. SEMA TOKER	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY