

	PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE KULLANMA TALİMATI	Doküman No: DPU-KYS-TL-56
		İlk Yayın Tarihi: 05.12.2023
		Rev. No: 00
		Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu uygulama laboratuvarında bulunan parmak tipi pulse oksimetre aletinin doğru ve güvenli bir biçimde kullanılmasını tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat; Üniversitemizin Pazarlar Meslek Yüksekokulu Uygulama Laboratuvarında bulunan parmak tipi pulse oksimetre aleti ile yapılacak olan ölçümleri kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği uygulama laboratuvarını kullanan program koordinatörleri ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazı, LCD ekran yukarı gelecek şekilde konumlandırın.

5.2. Parmağınızı, tırnak yukarı gelecek şekilde konumlandırın.

5.3. Cihazı mandal gibi açın ve parmağınızı cihazın içine yerleştirin.

5.4. Butona basın ve cihaz çalıştıktan sonra değerleri ekrandan izleyin.

5.5. Cihazı hangi parmakta kullandığınız önemli değildir. Pulse oksimetreler genellikle işaret parmağında kullanılır. İşaret parmağında yara veya şekil bozukluğu varsa diğer parmaklarda da kullanılabilir.

5.6. Parmak doğru bir şekilde cihaza yerleştirilmezse ölçüm sonuçları yanlış olabilir.

5.7. Cihazı açıp parmağınızı cihaza yerleştirmeyeniz, ekranda “Finger Out” uyarısı görünür ve cihaz 1-2 saniye içinde otomatik olarak kapanır.

5.8. Parmağınızı doğru şekilde konumlandırın ve cihazı açmak için butona basın. İşlemi doğru yaptıysanız parametreler ekranda görünecektir.

5.9. Parmak tipi pulse oksimetre aleti kullanımı sonrasında uygun şekilde temizliği yapılır ve kaldırılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. Sema TOKER	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY